



## Universalhalterung für eWalk MCG1900

### Inhalt.

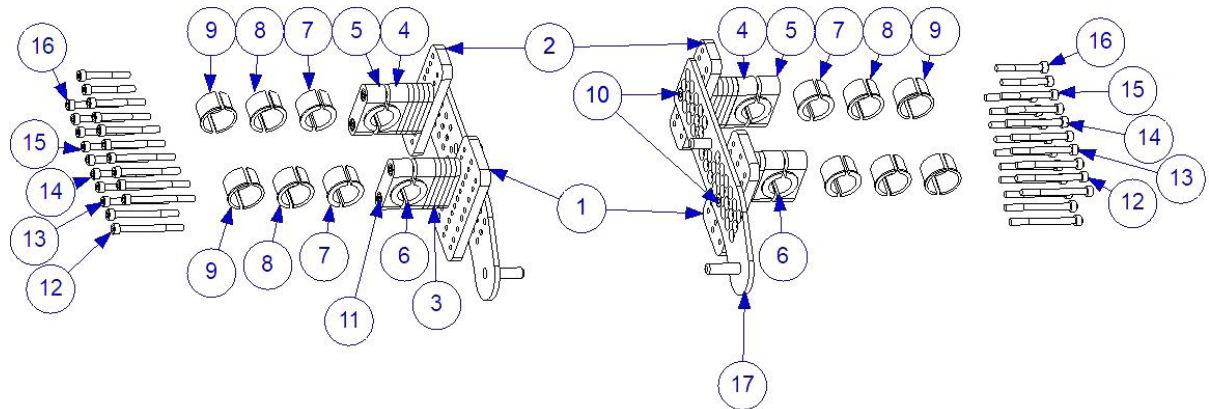

| Position | Artikelnummer | Anzahl | Beschreibung                 |
|----------|---------------|--------|------------------------------|
| 1        | MCG1903       | 2      | Hintere Platte               |
| 2        | MCG1904       | 2      | Frontplatte                  |
| 3        | MCG1905       | 20     | Zwischenplatte               |
| 4        | MCG1906       | 4      | Halterung                    |
| 5        | MCG1907       | 4      | Halterungsklemme             |
| 6        | MCG1922       | 8      | Distanz 22                   |
| 7        | MCG1925       | 8      | Distanzring 25               |
| 8        | MCG1928       | 8      | Distanzring 28               |
| 9        | MCG1930       | 8      | Distanzring 30               |
| 10       | XSFM6X14      | 4      | Einbauschraube M6 x 14       |
| 11       | MC6SM6X70     | 8      | Schraube zylindrisch M6 x 70 |
| 12       | MC6SM6X65     | 8      | Schraube zylindrisch M6 x 65 |
| 13       | MC6SM6X60     | 8      | Schraube zylindrisch M6 x 60 |
| 14       | MC6SM6X55     | 8      | Schraube zylindrisch M6 x 55 |
| 15       | MC6SM6X50     | 8      | Schraube zylindrisch M6 x 50 |
| 16       | MC6SM6X45     | 8      | Schraube zylindrisch M6 x 45 |
| 17       | MCG1902R      | 1      | Halterung mit Pin rechts     |
| 18       | MCG1902L      | 1      | Halterung mit Pin links      |

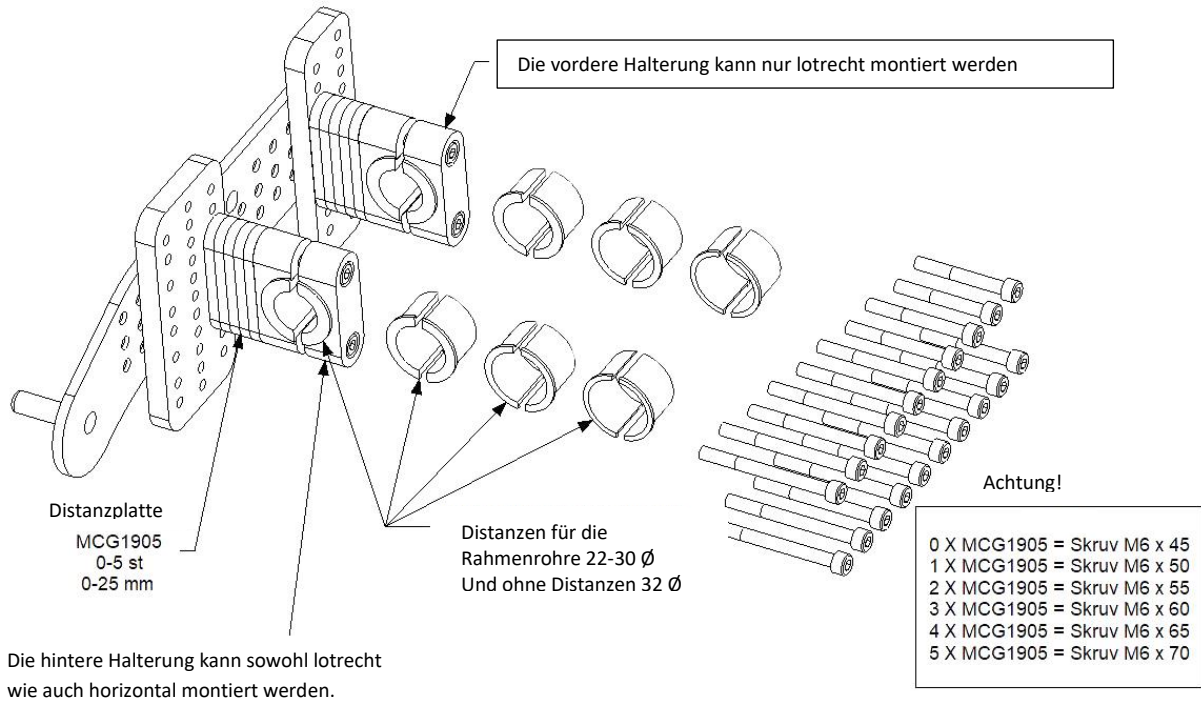

1. Wählen Sie bei Bedarf Distanzen für die Rohrrahmen aus.
2. Wählen Sie Distanzplatten aus, um Abstand von den Rahmenrohren und Kippstützen zu bekommen.
3. Montieren Sie wie unten gezeigt. Wenn Sie den hinteren Pin in einer Höhe von 195 mm und den vorderen Pin mit 225 mm montiert haben, ist die Halterung optimal für die horizontale Montage positioniert.

